


Instrucciones para Calibrar el Caliper

¿Qué necesitas?


- Caliper
- Herramienta de calibración
- Etiqueta actualizada
- Marcador
- Toallitas con alcohol/alcohol y toallas de papel

¿Cómo actualizar?

1. Retire la etiqueta actual que dice "delgada, ideal, gorda" de los Calipers. Aleje la aguja de la etiqueta para asegurarse de retirarla por completo.
2. Una vez que haya quitado la etiqueta, limpie cualquier residuo o etiqueta que quede en la pinza. Limpie con alcohol o agua y deje secar.
3. Inserte las puntas de cada lado del Caliper en las muescas de la herramienta de calibración de plástico negro y colóquelo sobre una superficie plana. Asegúrese de que el centro del calibrador quede al ras en el Caliper.

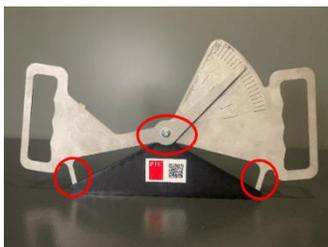

4. Usando un marcador, dibuje una línea desde la punta de la aguja del Caliper hasta el borde exterior, esto debe extenderse más allá de las líneas grabadas en el Caliper.

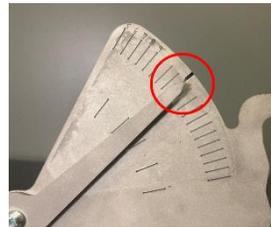

5. Retire el Caliper de la herramienta de calibración. Mueva la aguja hacia el lado opuesto para dejar suficiente espacio para aplicar la etiqueta.
6. Localice la línea negra que separa la categoría "2 – RECUPERACION (Recovery) " y la categoría "3 – OBJETIVO (Target)".
Esto se alinearé con la línea dibujada anteriormente. Retire la parte de papel de la etiqueta comenzando en el borde exterior. Coloque primero el exterior de la etiqueta y presione hacia abajo mientras retira el papel protector.



7. Una vez colocada la etiqueta, coloque el Caliper una vez más en la herramienta calibradora para confirmar que la aguja cae directamente sobre la línea negra que separa las categorías dos y tres. Si es así, entonces la actualización está completa.
Si la aguja no coincide con la línea, repita el proceso y vuelva a aplicar la etiqueta.



PIC Latinoamérica
www.latam.pic.com



Para instrucciones en video y más información, escanee este código QR:



Póngase en contacto con su representante de servicios técnicos para cualquier pregunta adicional.

Oficina en México
Wenceslao de la Barquera No. 7
Villas del Sur.
Querétaro, Qro. CP 76040
+52 (442) 2 12 98 76

Oficina en Santiago de Chile
Av. Del Parque 4161, Oficina 601
Ciudad Empresarial.
Huechuraba.
+56 2 27575500

 **Nunca Dejamos de Mejorar**